

Wiba Sport AG
Spahau 1 • 6014 Luzern
Telefon 041 250 80 80
info@wiba-sport.ch
www.wiba-sport.ch




Produktinformationsblatt

Mehrfach-Kalt/Warmkomresse

Kalt Anwendung: Die Komresse wird für 2 Stunden in das Gefrierfach oder die Tiefkühltruhe gelegt. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Komresse in ein Tuch eingewickelt werden.

Warm Anwendung: Die Komresse wird für ca. 5 Minuten in max. 80° Grad heissem Wasser erwärmt. Alternativ kann die Komresse auch in der Mikrowelle bei 500 Watt erhitzt werden. Hierbei sollte die Komresse nicht länger als 2 Minuten in der Mikrowelle erhitzt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Komresse in ein Tuch eingewickelt werden.

Artikelnummer: D6118

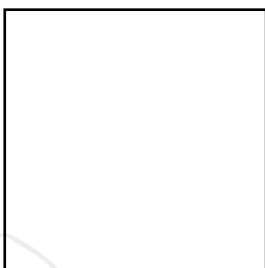

Zubehör zum Artikel

